



Innovation

# DIVEEN®


Intravaginalt hjälpmedel som reducerar ansträngningsinkontinens.<sup>1</sup>

# Gör vardagen **enklare**...

Miljontals kvinnor runt om i världen lider av ansträngningsinkontinens. I Sverige drabbar detta ca en halv miljon kvinnor.

Har du varit orolig för att skratta, gå på fest eller att delta i sportaktiviteter? Urinläckage kan påverka dig i din vardag och hindra dig att göra de saker du helst vill göra.<sup>2</sup>

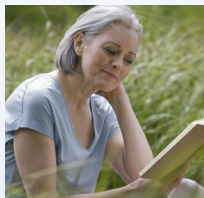


Nu finns det en lösning som kan hjälpa dig,



Vad är Diveen® ?

Diveen® är ett intravaginalt hjälpmedel indikerat för kvinnor med urinläckage, speciellt ansträngningsinkontinens.

## Kliniskt bevisad **effektiv** behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor.<sup>3</sup>

-  Diveen® reducerar frekvensen av urinläckage med i genomsnitt 69%<sup>3</sup>
-  Diveen® förbättrar signifikant kvinnans upplevelser när det gäller symptom: Poäng för tillfredsställelse 78/100 för de patienter som använde Diveen\*
-  Diveen® förbättrar kvinnans emotionella välmående<sup>3</sup>

\*4 av 5 som prövat Diveen® får helt eller delvis hjälp med sina besvär.

(1) Brevet EP 1 924 218 B1


(2) Haab F. et al. Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en Urologie 2001, 11:336-339

(3) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International UrogynecologyJournal 2012, 23 (12): 1727-34


# Varför Diveen®?

Diskret, effektiv och enkel att använda<sup>3)</sup>

Diveen® lätt att ha med sig

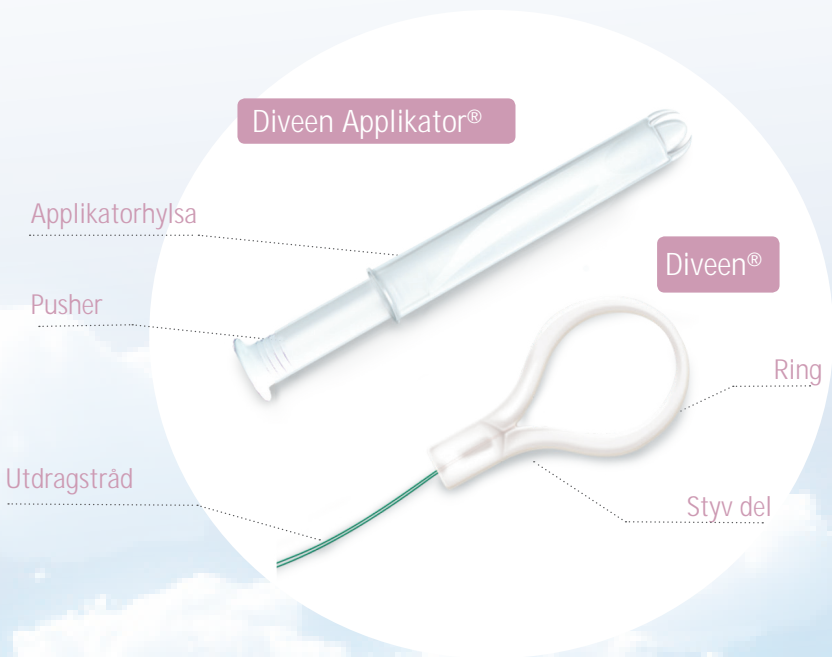

## Innovativt och patenterat koncept<sup>1)</sup>

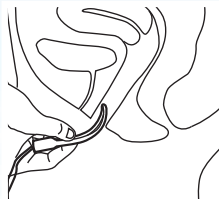

Diveen® är designad för att stödja slidväggen i området under blåshalsen. Vid ansträngningar trycker vikten från blåsan på den flexibla ringen vilket gör att den styva delen stänger till urinröret och reducerar risken för urinläckage<sup>3)</sup>

# Varför använda Diveen® ?


- En unik mekanism som möjliggör signifikant reduktion av risken för urinläckage.<sup>1</sup>
- Bara du som vet om att du använder den, ett 100% diskret skydd
- Består enbart av biokompatibelt material.<sup>1</sup>
- 12 timmars inkontinenskontroll som gör det möjligt att delta i fysiska aktiviteter.
- Enkel att använda liknande en tampong. Kan användas hela dagen, även vid toalettbesök.
- Kan sättas in utan att använda applikatorn.

# Hur du använder Diveen® i några enkla steg\*

1. Före användning av Diveen®
  - Tvätta händerna noggrant.
  - Hitta en komfortabel ställning.

## 2. Förberedelse av Diveen®

- Kläm försiktigt ihop den flexibla ringen och för in den i applikatorhylsan.
- Sätt tillbaka pushern i applikatorhylsan.

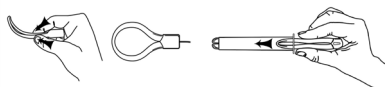

## 3. Införelse av Diveen®

- För in applikatorhylsan i vaginan.
- Tryck in ringen vidare med hjälp av pushern (på samma sätt som när man applicerar en tampong med applikator).



## 4. Borttagning av Diveen®

- Dra försiktigt i utdragstråden för att ta ut ringen från vaginan.



\*Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Konsultera din doktor för råd för behandling av din inkontinens.

Artikelnr.	Storlek	Antal/box
3132NO	Small	5 stycken +1 applikator
3133NO	Medium	5 stycken +1 applikator
3022NO	Small	15 stycken +1 applikator
3023NO	Medium	15 stycken +1 applikator
3025XX	Utprovningssat	1 S, 1 M + 1 applikator

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos mentioned herein are the exclusive property of B. Braun.

Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an infringement of the intellectual property rights of B. Braun.

Non binding documents and photographs.

For healthcare professional use only. Please read carefully the instructions for use.



B. BRAUN Medical AB  
Svärdvägen 21, 182 12 Danderyd  
+46 (0)8 634 34 00

CE 0123