



► Förebygger och avlägsnar biofilm (bakterier som fäster på katetern). Biofilmen kan både orsaka infektion och obehaglig lukt.

► Sköljer bort skräp och slem som riskerar att blockera katetern

**Vänd för bruksanvisning**


**URO-TAINER® POLIHEXANID**  
ETT SPOLSYSTEM FÖR KVARLIGGANDE KATETER

**PATIENTINFORMATION**

# URO-TAINER® POLIHEXANID

## ETT SPOLSYSTEM FÖR KVARLIGGANDE KATETER

### Så här använder du Uro-Tainer® Polihexanid:

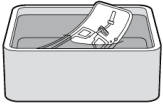


Uro-Tainer® Polihexanid-påsen är sterilförpackad och ytterpåsen tas bort först när produkten ska användas. Lösningen bör värmas till kroppstemperatur - ungefär 37 °C - genom att läggas i varmt vatten innan ytterförpackningen tas bort.




1, Öppna ytterpåsen och ta ur Uro-Tainer®

Steg 1

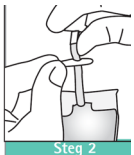

2, Stäng Uro-Tainer®-slangen med plastklämman.

Steg 2

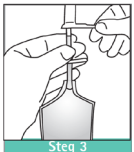


3, Ta bort förseglingsringen.

Steg 3



4, Vrid och ta loss locket utan att röra den sterila konnektorn.

Steg 4

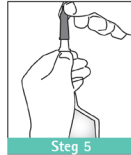

5, Anslut konnektorn till urinkatetern.

Steg 5




6, Håll Uro-Tainer® ovan urinblåsans nivå, öppna klämman och låt vätskan flöda in av gravitationen.

Steg 6



7, När vätskan har slutat rinna in, sänk Uro-Tainer® och håll den under urinblåsans nivå för att samla upp vätskan i påsen igen.

Steg 7

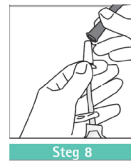

8, Stäng klämman och ta bort konnektorn från katetern genom att försiktigt vrida loss den. Anslut katetern till en steril urinpåse. Kassera Uro-Tainer® och tvätta händerna.

Steg 8

### Tänk på att:

► Hela mängden vätska behöver inte gå in i blåsan, utan endast den mängd som rinner in av sig självt med hjälp av gravitationen.