

## FÖRVARING I VÄRMESKÅP

**ECOFLAC® PLUS** (stadig infusionsbehållare med upphängningsögla)  
Förvaring i värmeskåp: **6 månader**

Plasten i Ecoflac® Plus är LD-PE (Low Density PolyEten)



**ECOBAG® IV** (mjuk infusionspåse)

Förvaring i värmeskåp/värmelådor med ytterpåse: **6 månader**

Produkterna:

Tetraspan®, Venofundin®, Gelofusin® med ytterpåse: **3 månader**

**Datummärk påsen när den läggs i värmeskåp.**

Plasten i Ecobag® är ett 3-skikt laminat;

insidan polypropylen, mellanskiktet polyeten och utsidan polyester.

Lagringstiden är 24 månader vid rumstemperatur dock högst 25° C.

Får ej användas efter utgångsdatum. Får ej frysas.



**OBS** - Då ytterförpackningen brutits skall produkten omedelbart användas.  
Använd endast klar lösning från oskadad ytterförpackning.

**ECOBAG® CE** (3-literspåse med spillösning)

Förvaring i värmeskåp: **3 månader**

Plasten i Ecobag® är ett 3-skikt laminat;

insidan polypropylen, mellanskiktet polyeten och utsidan polyester.



**ECOTAINER®** (skruvkorkflaska med spolvätska)

Förvaring i värmeskåp: **6 månader**

Plasten i Ecotainer® är polypropen (PP)



**Värmeskåpsförvaring i korthet:**

Typ av behållare	Maxtid i värmeskåp
Ecoflac® Plus	6 månader
Ecobag® IV	6 månader, 3 mån produkterna ovan.
Ecobag® CE	3 månader
Ecotainer®	6 månader
Injektionsglas	6 månader

Samtliga behållare kan också värmas i mikrovågsugn, dock måste tid och effekt valideras.

**Observera att samtliga behållare ovan är både latex- och pvc-fria.**