

# INTROCAN SAFETY® 3

## SLUTEN IV-KATETER FÖR CT/MR

Juli 2018

### Tillförlitlig bilddiagnostik

Datortomografi räknas som ett komplext område med noggrant urval av rätt IV kateter. Introcan Safety® 3 är avsedd för användning upp till 300 psi (21 bar) vilket gör den till en idealisk IV kateter för administrering av kontrastmedel med tryckspruta. Introcan Safety® 3 inte bara eliminerar användningen av en injektions-port utan erbjuder också mer effektiv tillförsel av kontrastmedier vilket gör det möjligt att välja en tunnare IV kateter än man vanligtvis brukar göra vilket gör det behagligare för patienten.

Kontrastmedel	Rumstemperatur					17.8Kroppstemperatur				
	Viskositet mPa	Flöde ml/s				Viskositet mPa	Flöde ml/s			
		@20°C (*=-25°C)	24G	22G	20G		18G	37°C	24G	22G
Optiray™ 160	2.7*	6.5	8	13.9	18.9	1.9	6.5	8.1	14.1	19.1
Optiray™ 240	4.6*	6	4.8	13.6	18.6	3	6.5	7.9	13.8	18.9
Optiray™ 300	8.2*	6	7.2	13.1	18	5.5	6	7.6	13.4	18.4
Optiray™ 320	9.9*	6	7.1	12.8	17.8	5.8	6	7.6	13.4	18.4
Optiray™ 350	14.3*	6	6.6	12.1	17.1	9	6	7.2	12.1	17.9
Niopam 300	8.8	6	7.2	12.8	17.9	4.7	6	7.7	13.6	18.6
Niopam 340	12.7	6	6.8	12.3	17.3	6.5	6	7.5	13.4	18.3
Niopam 370	20.9	5.5	5.8	11	16	9.4	6	7.1	12.8	17.8
Ultravist® 300	9.2	6	7.2	12.9	17.9	4.9	6	7.7	13.6	18.6
Ultravist® 370	22	5	5.6	10.8	15.8	10	6	7.1	12.8	17.8
Omnipaque™ 140	2.3	6.5	8	14	19	1.5	6.5	8.2	14.2	19.2
Omnipaque™ 180	3.1	6.5	7.9	13.9	18.9	2	6.5	8.1	14.1	19.1
Omnipaque™ 240	5.8	6	7.6	13.4	18.4	3.4	6.5	7.9	13.8	18.8
Omnipaque™ 300	11.8	6	6.8	12.4	17.6	6.3	6	7.5	13.4	18.3
Omnipaque™ 350	20.4	5.5	5.8	11.1	16.1	10.4	6	7	12.6	17.7
Visipaque™ 270	12.7	6	6.8	12.3	17.3	6.3	6	7.5	13.4	18.3
Visipaque™ 320	26.6	5	5.1	10.2	15.1	11.8	6	7	12.4	17.4
Isovue® 200	3.3	6.5	7.9	13.8	18.8	2	6.5	8.1	14.1	19.1
Isovue® 250	5.1	6	7.7	13.5	18.6	3	6.5	7.9	13.8	18.9
Isovue® 300	8.8	6	7.2	13.9	18	4.7	6.5	7.7	13.6	18.6
Isovue® 370	20.9	5.5	5.8	11	16	9.4	6	7.1	12.8	17.8
Oxilan®	9.4	6	7.2	13.8	17.9	5.1	6	7.7	13.6	18.6
Oxilan®	16.3	6	6.3	11.8	16.8	8.1	6	7.3	13.1	18
Iomeron® 300	8.1	6	7.3	13	18	4.5	6.5	7.7	13.6	18.6
Iomeron® 350	14.5	6	6.6	12	17	7.5	6	7.4	13.2	18.2
Iomeron® 400	27.5	5	5	10	15	12.6	6	6.8	12.4	17.2



Storlek (G)	Längd (mm)	PUR	Art.nr.
24	19	●	4251127-01
22	25	●	4251128-01
20	25	●	4251129-01
20	32	●	4251130-01
20	50	●	4251137-01
18	32	●	4251131-01
18	45	●	4251132-01