

# Ecoflac® Plus - Ecoflac® Connect

## Läkemedelsberedning Alt. 1



Ecoflac® Plus-infusionsförpackning, injektionsglas med läkemedel, Ecoflac® Connect, överförings-adapter, infusionsaggregat.



Avlägsna aluminiumskydden på infusionsförpackningen, behöver ej sprittorka, portarna är sterila.  
Anslut Ecoflac® Connect överföringsadapter till infusionsförpackningen, ett klick avges när anslutningen är gjord.  
Anslut injektionsflaskan. Ett klick avges när anslutningen är gjord.  
Anslut infusionsaggregatet. Luftventil och rullklämma skall vara stängd.



Fyll droppkammaren till ca. hälften, öppna rullklämman och fyll slangen. Stäng rullklämman.



Med rullklämman stängd, pressa kraftigt på behållaren så att lösning överförs till ca. hälften i injektionsflaskan.



Skaka och lös upp för fullgod blandning. Tryck upprepade gånger så att all lösning återförs till behållaren.



Anslut till patient och starta infusionen. Läkemedelsampullen hänger kvar, visar vad som administreras. Efter avslutad infusion kasseras allt i sin helhet.

Benämning	Avd.fp.	Artikelnr.
Ecoflac® Connect 13mm (S)	50	4090549
Ecoflac® Connect 20mm (M)	50	4090550
Ecoflac® Connect 32mm (L)	50	4090552

