

Diveen®

Bruksanvisning


Indikationer

Diveen® är en intravaginal produkt, indikerad för kvinnor med urinläckage, speciellt ansträngningsinkontinens eller mixad urininkontinens.

Mekanism

Diveen® är utformad att stötta slidväggen i området under blåshalsen. Vid ansträngningar, så lägger vikten från blåsan tryck på den flexibla ringen på Diveen® vilket medför att den styva delen stänger till uretra och betydligt reducerar risken för urinläckage. (7)

Diveen® Applikator

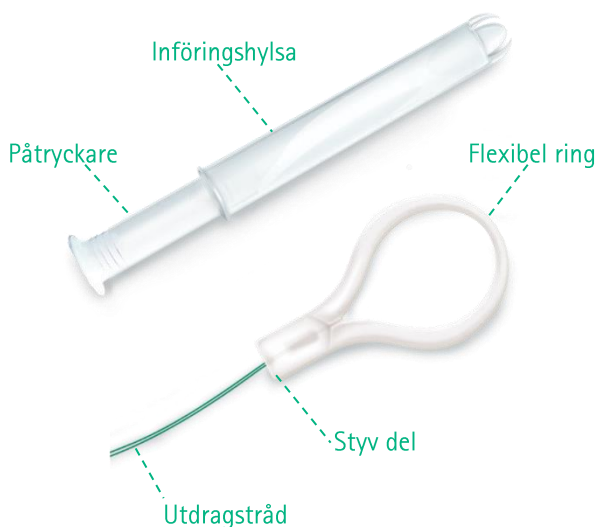

1. Före användning av produkten

- Tvätta noggrant dina händer och ta ut produkten och applikatorn från omslaget.
- Intag komfortabel position: antingen ståendes med benen lätt böjda, eller sittandes eller liggandes.

2. Applikation av produkten

Produkten kan föras in som en tampong.

Användning av produkten med applikatorn

För din bekvämlighet så kan insättning göras med hjälp av applikatorn.

Förberedelse av produkten

- Dra ut påtryckaren som sitter inne i applikatorsröret. (1)
- Kläm försiktigt ihop ringen för att föra ihop halvorna mot varandra, (2) för in den i införingshylsan och tryck den med pekfingeret till toppen av ringen när den avrundade änden på införingshylsan. (3)
- Sätt tillbaka påtryckaren på införingshylsan för att göra klart för införing. (4)

Införing av produkten

- För in toppen av applikatorsröret ca 2 cm in i vaginan (5) och skjut sedan på produkten med applikatorn in i vaginan (samma metod som vid bruk av tampong med applikator). (6)
- Ringen placeras automatiskt i rätt position. (7)
- Ta ut och tvätta (med vatten / tvål) och torka införingshylsan och påtryckaren ; förvara på rent och torrt ställe inför nästa användning.

Användning av produkten utan applikator

- Kläm försiktigt ihop ringen för att föra ihop halvorna mot varandra (2) och för in den försiktigt i vaginan tills den automatiskt placeras i rätt position. (1b)
- Säkerställ att änden på utdragstråden är på utsidan av kroppen.

Ringen kan användas hela dagen. Den behöver ej tas ut vid toalettbesök.

3. Uttagning av Diveen®

- Dra försiktigt i utdragstråden för att ta ut ringen från vaginan.
- Materialet i produkten är inte återvinningsbart och ska slängas i brännbart avfall.

Säkerhetsföreskrifter

- Ta ut produkten innan natten efter en dags användning
- Använd inte produkten ihop med lokalverkande läkemedel
- Produkten kan användas upp till två gånger
- Rengör endast med tvål och vatten. Använd inte rengöringsmedel, tvätt- eller diskmedel.
- Före återanvändning, tvätta (med vatten/tvål) och torka produkten och applikatorn.

Varning

- Spola ej ner i toaletten
- Använd Diveen® ska endast användas av en och samma person och får ej delas.

Oönskade biverkningar

- Vid beständigt obehag eller klåda, ta ut produkten omedelbart och ta kontakt med läkare.

Råd

Rådfråga din läkare för bästa möjliga behandling av din inkontinens.

Kontraindikationer

- Ska endast användas av vuxna personer som är över 18 år
- Produkten ska inte användas under graviditet.
- Efter förlossning, vänta till såren är helt läkta och tills avslaget (blödningen) helt avtagit före användning av produkten.
- Produkten ska inte användas under menstruationsperiod.
- Produkten ska inte användas under sexuellt samlag
- Om du inte har haft sex med vaginal penetration, tala med din läkare före användning av produkten.

