


# Prontosan®

För spolning och upprensning av sår med biofilm, en förenklad guide hur du kan optimera sårrengöringen

## Steg 1. Prontosan® lösningen

Såret spolas kortvarigt med Prontosan® Sårspolvätska för att ta bort lösa beläggningar. Dränk sedan in en steril kompress med Prontosan Sårspollösning och låt den ligga och dra över såret i 10–15 minuter. Därmed bryts ytspänningen i biofilmen, detta gör att upprensningen blir mer effektiv. Avsluta med att torka av såret med en ny steril kompress.

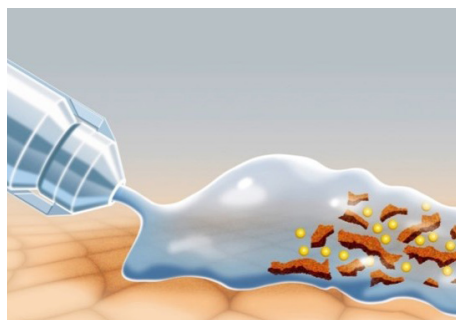

## Steg 2. Prontosan® Debriment Pad

Om ni har tillgång till Prontosan® Debridement Pad kan ni använda denna för att maximera rengöringen då dess yta med microfiber har en förmåga att fånga upp och lösa micropartiklar som kan störa sårhäkningen. Öppna förpackningen, dränk paden med 20-30 ml Prontosan® Sårspollösning. Vår Pad är droppformad och tunn så att du kan välja att använda den större rundade delen för större sår eller den spetsiga delen till mindre och mer svåråtkomliga delar av såret. Debridera genom att med mjuka rörelser föra debrideringsdynan runt i såret. Efter användning skall den kasseras.



## Steg 3. Prontosan® Sårgel eller Prontosan® Gel X

När såret är rengjort kan ni välja att förlänga upprensningen i såret och motverka att biofilmen tillväxer genom att applicera en av valda Prontosan® geler i såret. Applicera gelen så att den täcker sårets yta ordentligt och täck med lämpligt förband dvs ett förband som du anser passar sårets beskaffenhet. Tänk på att långvarig behandling med en fuktig gel kan öka risken för maceration av sårkanterna och dessa kan då behöva skyddas med ett barriärskydd/film.



Prontosan® Gel X mer trögflytande



Prontosan® Sårgel mer tunnflytande

När det är dags för förbandsbyte, rengör igen, utvärdera såret och om bedömning om fortsatt behandling med Prontosan® repetera enligt guide tills ni uppnått förväntat resultat.

Om ni efter 2 veckor inte ser någon förbättring i sårets status utvärdera fortsatt behandling med Prontosan®. Syftet med rengöringen är minskad sårsekretion, ett renare sår, reducerad biofilmlast, förhindrande av biofilmbildning och minskad risk för infektion allt för en snabbare sårhäkning.

## Egenskaper

- Prontosan® har en dokumenterad effekt på biofilm och kan minska risken för infektion.
- Prontosan® löser upp och avlägsnar biofilm, cellrester, fibrinbeläggning, nekrotisk vävnad m.m.
- Prontosan® skyddar granulovävnad och epitelisering.
- Prontosan® är hållbar i upp till 8 veckor efter brutna förpackningar (gäller ej 40 ml ampullen som är en engångsprodukt)

## Produktprofil och användningsområden

a) akuta icke-infekterade och infekterade sår: traumatiska sår, t.ex. rivsår, bett, skär- eller krosskador, postoperativa sår. b) kroniska icke-infekterade och infekterade sår inklusive trycksår, venösa sår, diabetessår. c) termiska sår och sår orsakade av kemikalier, 1: a och 2: a gradens brännskador (Prontosan Gel X kan användas på brännskador 3:e graden) och kemiska brännskador. d) post-strålskador. e) fistlar och bölder. f) ingångar för urologiska katetrar, PEG/PEJ-rör eller dräneringsrör. g) peristomal hud.

## Kontraindikationer

Prontosan® ska inte användas a) om det är känt att patienten är allergisk eller vid misstanke att patienten kan vara allergisk mot någon av substanserna i produkten. b) på CNS eller hjärnhinnorna. c) i mitten- eller innerörat. d) i ögonen. e) på hyalint brosk och vid aseptisk ledkirurgi. Om Prontosan® kommer i kontakt med aseptiskt brosk ska det omedelbart spolvas med Ringerlösning eller normal saltlösning. f) i kombination med anjoniska tensider. g) i kombination med tvål, salvor, oljor, enzymer etc. Dessa ämnen ska noggrant avlägsnas från såret före användning. h) för peritoneal tvättning eller sköljning.

Läs mer i bruksanvisningen som tillkommer i respektive förpackning

## Mer information

För mer information om Prontosan och Biofilm gå gärna in på vår hemsida och läs mer om produkterna. Har ni frågor eller funderingar kring våra Prontosan produkter får ni gärna höra av er till mig.

## VID PRODUKTFRÅGOR, KONTAKTA GÄRNA

Region Stockholm, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Gotland  
Malin Forsberg, 072-1997655, malin.forsberg@bbraun.com

Västra Götalandsregionen och Region Värmland  
Anders Lundqvist, 0709-919261, anders.lundqvist@bbraun.com

Region Östergötland, Region Örebro, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Västernorrland,  
Region Sörmland och Region Uppsala  
Iris Didriksson, 0709-919264, iris.didriksson@bbraun.com

Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar och Region Jönköping  
Barbro Nilsson, 072-1997654, barbro.nilsson@bbraun.com

Region Jämtland/Härjedalen:  
Mats Johnsson, 0709-919272, mats.johnsson@bbraun.com

