

Meliseptol® Pure– Snabbverkande ytdesinfektion

Meliseptol® Pure är ett högeffektivt desinfektionsmedel baserat på etanol, som aktiv substans och är avsedd för medicintekniska produkter, t. ex undersökningsstolar, sjukhussängar, operationsutrustning och andra typer av ytor.

Det är även lämplig för ytor av metall. Den innehåller tensid som har en rengörande verkan.

- Bactericidal effekt i "clean & dirty" förhållanden
EN 13727 på 30s
EN 13697 på 30s
EN 16615 på 60s
- Mycobactericidal effekt i "clean & dirty" förhållanden
EN 14348 (60s)
- Jästicidal effekt i "clean & dirty" förhållanden
EN 13624 på 30s
EN 16615 på 60s
- Virucid effekt i "clean & dirty" förhållanden
Hepatit B, C och HIV på 30s
EN 14476 på nakna virus; Rota-, Adeno- och Noro virus på 30s



Vad bör man tänka på vid användandet av Meliseptol® Pure

- Sprita händerna och använd handskar.
- Följ arbetarskyddsnormer för hantering med brandfarliga och brännbara vätskor.
- Kontrollera materialkompatibilitet.
- Elektriska apparater måste vara avstängda innan desinficering. Om detta inte är möjligt skall försiktighetsåtgärder vidtas. Låt heta ytor svalna innan desinficering.
- Desinfektion av ytor utan synlig smuts: Fördela desinfektionslösning på hela ytan. Använd en engångsduk som förfuktas med Meliseptol® Pure
- Vid synlig smuts, måste förfarandet utföras i två steg:
 - Avlägsna synlig smuts med en engångsduk som är förfuktad med Meliseptol® Pure
 - Därefter utförs desinficeringen såsom beskrivits ovan.
- Flaskan inklusive snäpplocket är av polyetylenplast, som är återvinningsbart som hårdplast. Innehållet i flaskan och kvarvarande rester i flaskan är farligt avfall. Följ era lokala rutiner hur ni hanterar tomma flaskor.
- Öppnad flaska är hållbar och brukbar i minst 12 månader.

Materialkompatibilitet

- Meliseptol® Pure kan användas på alla alkoholbeständiga ytor och material.
- Meliseptol® Pure innehåller korrosionshämmare.
- Alkohol känsliga material bör först testas så att de tål Meliseptol® Pure.

Sortiment	Art nr	Hållbarhet	Avdfp
➤ Meliseptol ® Pure flaska, 250ml	19926	3 år	20
➤ Meliseptol ® Pure flaska, 1 liter	19927	3 år	10