



Celsite® subcutana venportar

Patientinformation

Patientinformation

Namn: _____

Adress: _____

Telefonnummer: _____

Sjukhusets namn: _____

Avdelning: _____

Datum för implantation: _____

Var är min venport placerad? _____

Vilken Celsite®-modell är implanterad? _____

☐

Silikonkateter

☐

Polyuretankateter

1	A	Ordlista
6	B	Min Celsite® subcutana venport
6		1-Vad är en subcutan venport?
6		2-Varför behöver jag en subcutan venport?
7		3-Hur fungerar min Celsite® subcutana venport?
8	C	Implantation av Celsite® subcutan venport
8		1-Hur implanteras min Celsite® subcutana venport?
8		2-Före implantationen
8		3-Dagen för implantation
9		4-Efter implantationen
9		5-Potentiella komplikationer
10		6-Underhåll av min Celsite® subcutana venport
11	D	Användning och underhåll av min Celsite®- subcutan venport
12	E	Komplikationer
13	F	Frågor och svar

Ordlista

A

Din läkare har beslutat att du kommer att behöva genomgå en behandling som kräver kontinuerlig eller intermittent tillgång till ett kärl. För att underlätta detta har man rekommenderat dig att implantera en Celsite® subcutan venport. För att hjälpa dig förstå din behandling bättre hittar du nedan en ordlista som listar de vanligaste termerna som kommer att användas av medicinsk personal när de hänvisar till din subcutana venport eller din behandling.

SUBCUTAN VENPORT	Enhet som består av en kateter ansluten till ett porthus. Den implanteras under huden och används för att leverera läkemedel till blodomloppet
BOLUS	Injektion som ges under en kort tidsperiod
KATETER	En tunn slang som är placerad i en ven/kärl
CENTRALA KÄRL	Större kärl nära hjärtat
SPOLA	Skölja med vätska
HEPARIN	Läkemedel som hjälper till att förhindra koagulation
IMPLANTATION	Operation/inläggning av en subcutan venport
INFUSION	Vätskeflöde in i ven eller artär under en viss tidsperiod från en påse eller flaska
INTRAVENÖS	I en ven
ORAL	Via munnen
PERIFERA VENER	Mindre vener; framför allt i armar och ben

PORT	Förkortning av subcutan venport
HÖGER FÖRMAK	Hjärtats övre högra kammare
SUBCUTAN	Under huden.
NATRIUMKLORID	Saltlösning för injektion (NaCl 0,9%)
TROMBOS	Bildning eller närvaro av en blodpropp inuti ett blodkärl
TROMBOFLEBIT	Venös inflammation med blodpropp



Min Celsite® subcutana venport


B

1–Vad är en subcutan venport?

Din Celsite® subcutana venport består av en kateter kopplad till ett porthus/behållare. Enheten placeras subcutant och kan användas under en lång tidsperiod för alla typer av kontinuerliga eller tillfälligt återkommande infusioner/injektioner

Fördelarna med en subcutan venport kan vara en eller flera av följande:

- Minskar antalet stick/punktioner i perifera vener som kan skadas av kemoterapi och då blir mindre tillgängliga
- Enklare och mer tillförlitlig tillgång ett större kärl för behandling
- Vård i hemmet kan underlättas
- Möjlighet att fortsätta med dina dagliga aktiviteter

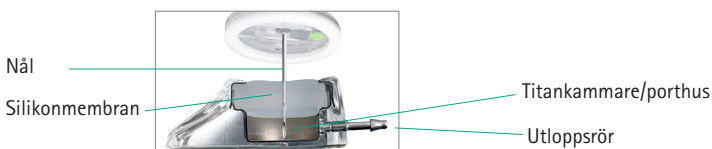

2–Varför behöver jag en subcutan venport?

Varje år får tusentals patienter en subcutan venport implanterad. Vissa av dem kommer bara att använda venporten under några månader, andra under en längre tid. Hur lång tid du kommer att använda din subcutana venport beror framförallt på behandlingstiden.

Anledningen till att din läkare beslutat att du ska få en subcutan venport är för att undvika upprepade injektioner eller infusioner i en av dina perifera vener.

3-Hur fungerar min Celsite® – subcutan venport?

Venporten består av två huvuddelar:

- **Katetern**, som placeras i en av dina centrala vener; vanligtvis i området runt nyckelben, hals eller arm. Kateterns spets placeras vid ingången till hjärtats högra förmak.
- **Porthuset/titankammaren** ansluts till katetern och placeras under huden. För att injicera läkemedel punkterar sjuksköterskan silikonmembranet i porten med hjälp av en speciell nål. Behandlingen injiceras i porten och transporteras via katetern in i blodomloppet.


Vena jugularis interna (inre halsvenen)

Vena jugularis externa (yttre halsvenen)

Vena subclavia (nyckelbensvenen)

Vena cephalica (ven i överarm)

Vena axillaris (ven i överarm)

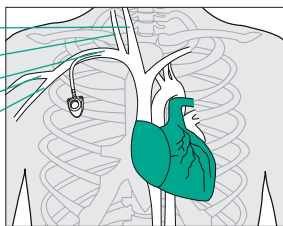

Implantation av Celsite® subcutan venport

C

Följande punkter är endast en generell beskrivning.

1–Hur implanteras min Celsite® subcutan venport?

Implantationen utförs oftast i en operationssal eller på röntgen.

Ingreppet tar cirka 30 minuter och utförs oftast i lokalbedövning.

Läkaren punkterar en ven för att föra in katetern. Ett snitt görs i huden för att skapa en liten ficka där porthuset placeras. Portfickan är gjord så liten som möjligt (ca 2,5 cm). Ett förband placeras sedan för att skydda snittet.

Om behandling krävs direkt efter ditt ingrepp är det möjligt att placera en nål i din port för att administrera behandlingen.

2–Före implantationen

Du kommer att ha fått en tid hos din läkare för att diskutera din behandling. Om du spelar mycket racketsport såsom tennis eller squash, eller om du tränar i en gevärsskytteklubb eller en kontaktsport, bör du nämna det för din läkare innan implantationen. Din läkare kommer då att kunna välja att implantera porten på en plats som inte påverkar dina aktiviteter.

Före ingreppet kan det behövas tas blodprover. Om du har några frågor kan din läkare eller sjuksköterska svara på dessa.

3–Operationsdagen

När det är möjligt opereras venporten i lokalbedövning. Detta kan dock variera från ett sjukhus till ett annat. Barn sövs vanligen.

Fordonskörning rekommenderas inte direkt efter ingreppet

4-Efter operationen

Sårläkningen tar några dagar, men din subcutana venport kan användas direkt efter implantationen. Porten är oftast synlig som en liten bula under huden. Bulan känns lätt under fingrarna och kan vara mer eller mindre synlig/känslig.

När du inte får regelbunden behandling genom din Celsite®-subcutana venport rekommenderas att den spolas var 4-6:e vecka (om inte annat anges av din läkare).

När ärret från operationen har läkt kan du simma, bada, springa och göra allt du gillade tidigare. Efter att du lämnat sjukhuset är det en bra ide att ha ditt patientkort med dig.

5-Potentiella komplikationer

Efter implantationen ska smärtan endast vara måttlig och kan behandlas med smärtstillande medicin.

I de flesta fall förekommer det inga komplikationer. Din läkare kommer att informera dig om möjliga komplikationer.

Om din venport orsakar smärta, vänligen informera din läkare eller sjuksköterska omedelbart.

6-Underhåll

Underhåll

Kontrollera venporten dagligen för rodnad eller svullnad.

Hygien

Om inte annat anges av din läkare kan du bada eller duscha efter den postoperativa perioden.

Ingen speciell försiktighet behövs om det inte finns någon nål insatt i porten.

Aktiviteter

Efter implantationen skall din subcutana venport inte orsaka smärta.

Du kan till största del utföra dina vanliga aktiviteter.

- Resa: Det finns inga kontraindikationer gällande resor. I en bil måste ditt säkerhetsbälte fortfarande vara fastspänt. Ha ditt patientkort med dig och visa det vid behov.
- Sola: Om du går ut i solen så skydda injektionsstället med solkräm.

Användning och underhåll av min Celsite® subcutana venport

D

För att ge din behandling kommer sjuksköterskan att punktera din port med en speciell nål. Venportens funktion kommer att kontrolleras genom aspiration av blod och spolning med saltlösning.

Införandet av nålen i venporten är i allmänhet relativt smärtfritt. Lokal bedövningskräm kan dock appliceras över injektionsstället för att bedöva området.



D

För att undvika risken för infektion kommer din sjuksköterska att använda en eller flera av följande:

- sterila handskar
- mask
- sterila kompresser
- hudrengöringslösning
- steril spruta
- steril nål

Läkemedel kan infunderas direkt eller via en pump eller en infusionspåse.

När behandlingen är avslutad spolas venporten och nålen tas bort.

Ett litet förband kan läggas över injektionsstället i några timmar och sedan tas bort.

Komplikationer

E

Om du mår dåligt, t.ex. har något av följande symtom måste du kontakta din läkare:

- Feber
- Lokal smärta
- Svullnad runt venporten
- Rodnad eller vätska runt ärret
- Andningssvårigheter

■ **Hur länge kommer jag behöva min Celsite® subcutana venport?**

Din Celsite® subcutna venport kan sitta på plats så länge som din läkare bedömer att du behöver den. Den tas vanligtvis bort i slutet av din behandling efter en diskussion med sjukvårdspersonalen.

■ **Är Celsite® subcutan venport godkänd för högtrycksinjektioner med kontrastvätska?**

Ja, för alla Celsite® venösa subcutana venportar. Visa alltid ditt patientkort för medicinsk personal som utför din röntgenundersökning.

■ **Kan jag genomgå en MR – röntgenundersökning med en Celsite® subcutan venport?**

Tester visar att Celsite® subcutana venportar och Surecan® portnålar är MR godkända.



Notering:

Följande material är endast generella råd och skall ses som allmängiltig information med tips som stöd till patienten och den medicinska personalen. Det ersätter inte på något sätt bruksanvisningar, vårdhandböcker, lokala eller andra generella anvisningar.

B. Braun Medical AB 2024.

Distributör

B. Braun Medical AB | www.bbraun.se

Tillverkare enligt MDD 93/42/EEG

B. Braun Medical, 26 rue Armengaud, 92210 Saint-Cloud, Frankrike

Produktvarumärket "Celsite" är registrerat varumärke som tillhör B. Braun Melsungen AG.

Med reservation för tekniska ändringar. Alla rättigheter förbehållna. Denna broschyr får endast användas i syfte att få information om våra produkter. Reproduktion i någon form, delvis eller på annat sätt, är inte tillåten.

6050189

v.241001