


Mini-Spike® 2 Chemo med PureSite

Ett enkelt och säkert system vid läkemedelsberedning av toxiska läkemedel

September 2019

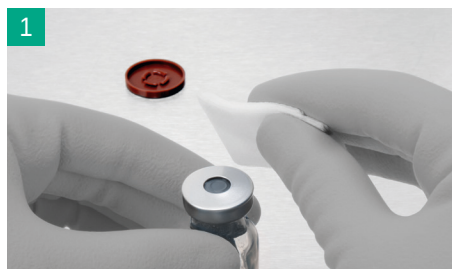


1. Avlägsna skyddslocket på läkemedlets injektionsflaska och desinficera membranet enligt gängse rutin.




2a. Avlägsna skyddshylsan från Mini-Spike® 2 Chemo. Stick in spiken i injektionsflaskan.



2b. Desinficera ventilen enligt gängse rutin.

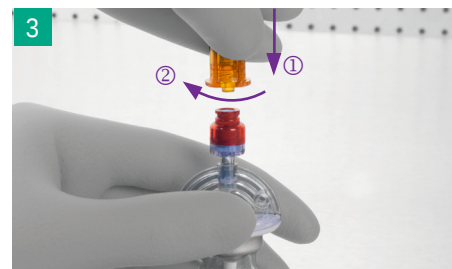

3. Anslut PureSite (Luer-Lock sprutan med spädningsvätska) till ventilen med upprättstående injektionsflaska. Skruva åt Puresite ordentligt tills det tar stopp (använd hela gängen) mot ventilen på Spike.

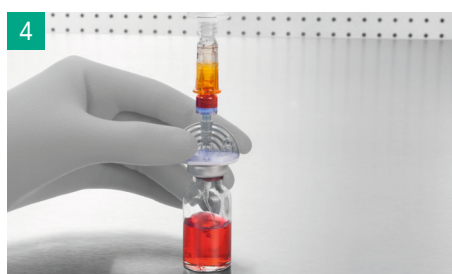


4. Injicera spädningsvätskan.
Viktigt: injektionsflaskan måste vara upprättstående.




5. Skaka vätskan enligt tillverkarens rekommendation så att läkemedlet löses upp ordentligt.



6a. Vänd injektionsflaskan upp och ner för att aspirera till sprutan.

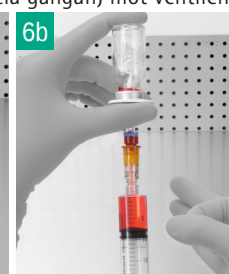

6b. För att avlägsna luft, drag upp ca halva volymen och knacka på sprutan. Tryck upp sprutkolven för att avlägsna luften, dra därefter upp den totala volymen.

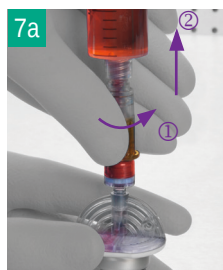


7a. Avlägsna PureSite från ventilen med injektionsflaskan upprättstående.




7b. Vid flergångsanvändning desinficera åter injektionsflaskan enligt gängse rutin.



8. Förslut PureSite med dammskyddslock vid transport (se PureSite dammskyddslock instruktion).

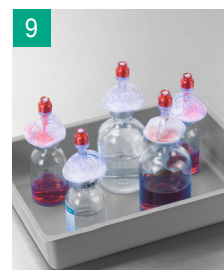


9. Vid flergångsanvändning ska injektionsflaskorna förvaras upprättstående. För förvaringstid och plats hänvisas till läkemedelstillverkarnas rekommendationer.

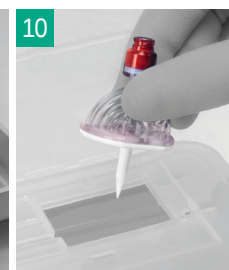

10. Kassering sker enligt gängse rutin.

* Mini-Spike 2 Chemo och PureSite sluten hanluerkoppling ger en säker beredning av toxiska läkemedel

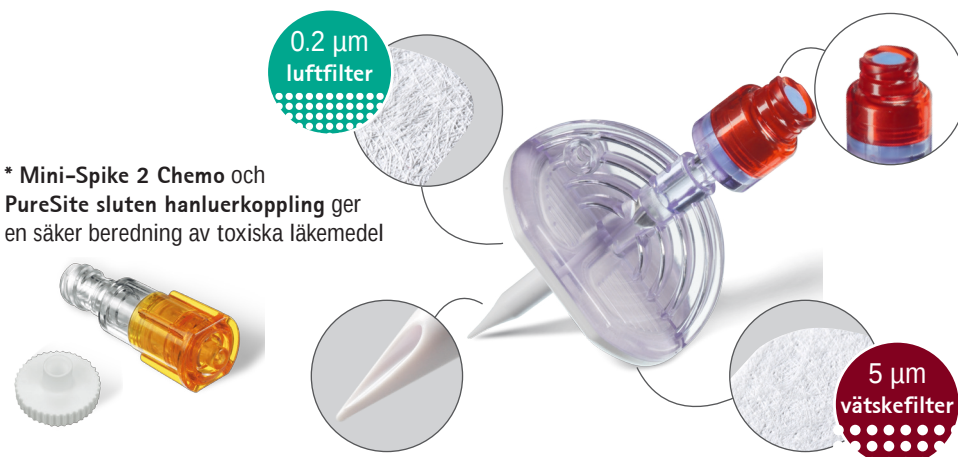

SÄKERHETSFÖRDELAR

- Minimerar kemisk och mikrobiologisk kontamination
- Minimerar partikkelkontamination
- Motverkar stickskador
- Intuitiv nålfri hantering

www.safeinfusiontherapy.com