

Desinfektionsinstruktioner för CARESITE® injektionsmembran

Tre enkla steg för att flusha eller administrera läkemedel:

1. Tvätta händerna



- Använd antibakteriell tvål och handskar.

2. Desinficera membranet



- Svabba kraftfullt med en spritsudd; god praxis rekommenderar minst 15 sekunder.
- Låt alkoholen torka.

3. Anslut och koppla ifrån



- **VIKTIGT: Avlägsna sprutan innan eventuell slangklämma stängs.**
- Avlägsna eventuell kvarvarande vätska på membranytan vid fränkoppling med spritsudd.

Kom ihåg:

- Svabba alltid kraftfullt med en spritsudd i minst 15 sekunder innan varje åtkomst och därefter vänta tills spriten avdunstat.
- Flusha före och efter administration av medicin.
- Flusha före och efter blodprovtagningar.
- Desinficera injektionsmembranet efter varje utförd blodprovtagning.
- Följ lokala riktlinjer gällande bytesfrekvens av injektionsmembran efter varje avslutad intravenös infusion.

För frågor eller information, kontakta B. Braun
Medical AB på **08-634 34 00**

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

www.bbraun.se

CS15_1_SJ