

Ecoflac® Connect

Ett säkert system för beredning av antibiotika i singeldos



Ett komplett system: Ecoflac® Plus - Ecoflac® Connect - Intrafix® Safeset. Enkelhet och säkerhet från beredning till infusion.

BEREDNING



1 Avlägsna sterilskydden på båda sidor. Spritavtorkning är ej nödvändigt.



2 Anslut Ecoflac® Connect. Ett klick avges när anslutning är gjord.



3 Anslut läkemedelsampullen. Ett klick avges när anslutning är gjord.



4 Vänd upp- och ner, tryck med kraft över Ecoflac® Plus till ca. hälften. Skaka och lös upp.



5 Tryck upprepade gånger så att all lösning återförs. Luften i Ecoflac® Plus är steril.



6 Anslut och fyll infusionsaggregatet. Anslut till patient.



7 Läkemedelsampullen hänger kvar, och visar vad som administreras.



8 Efter avslutad behandling kasseras allt i sin helhet.

ORDERINFORMATION

Benämning	Avd.fp.	Artikelnr.
Ecoflac® Connect 13mm (S)	50	4090549
Ecoflac® Connect 20mm (M)	50	4090550
Ecoflac® Connect 32mm (L)	50	4090552