


# Askina® SilNet

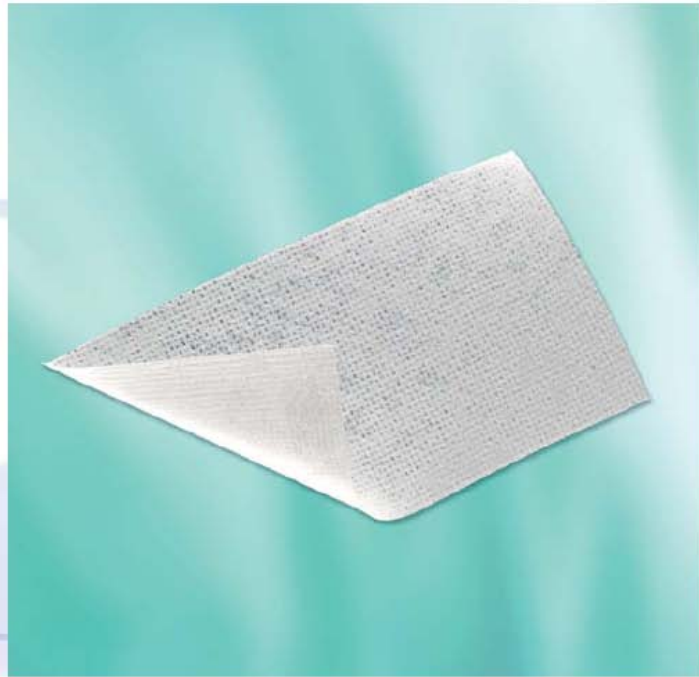

Ett mjukt sårkontaktslager av non-wovenmaterial med mjuk silikon på båda sidorna. Askina® SilNet skyddar sårbädden och låter exudat passera igenom till täckförbandet, tack vare alla småhål. Ingen sårvätska absorberas av Askina® SilNet



## Beställningsinformation Askina® SilNet

Storlek	Antal/Förp.	Artikelnummer
5 x 7,5 cm	10	5195710SE
7,5 x 10 cm	10	5197510SE
10 x 18 cm	10	5191810SE
20 x 30 cm	5	5192305SE

### Användningsområden:

Hudflikar, skärsår, skrubbsår, rivsår, skavsår, blåsor, kirurgiska sår, trycksår i stadium I – IV, första och andra gradens brännskador samt venösa, arteriella och neuropatiska sår.

- SilNet kan sitta kvar upp till en vecka, kontrollera dock att sårvätskan kan passera fritt till ytterförbandet.
- SilNet har lika mycket silikon på båda sidorna. det spelar alltså ingen roll vilken sida du sätter mot såret.
- Täck sårytan med SilNet och lämna 2 – 3 cm marginal utanför sårkanten. Det går bra att överlappa förbanden.
- Klipp gärna till SilNet i önskad storlek vid behov, men gör det innan skyddsfilmen tas bort.
- Täck med ett sekundärt absorberande förband.

### Kontraindikationer:

Använd EJ på sår orsakade av infektion (som t ex tuberkulos, syfilis eller djup svamp) eller på blödande sår.