


INTROCAN SAFETY® 3 HANDHAVANDE




1. FÖRBEREDELSE

- Desinfektera insticksstället enligt lokala anvisningar.
- Anpassa punktionsvinkeln och för in kanylspetsen i venen.

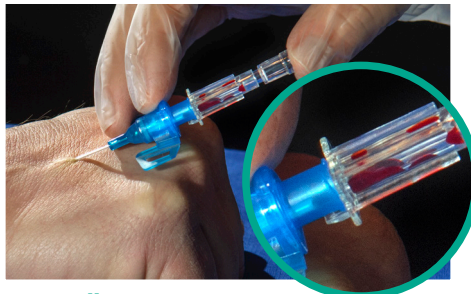

2. INLÄGGNING

- Observera det första blodsvaret i blodkammaren.
- Sänk stickvinkeln något och för sedan in katetern och stålkanylen som en enhet (cirka 2 mm) för att säkerställa att kanylspetsen ligger i kärlet.

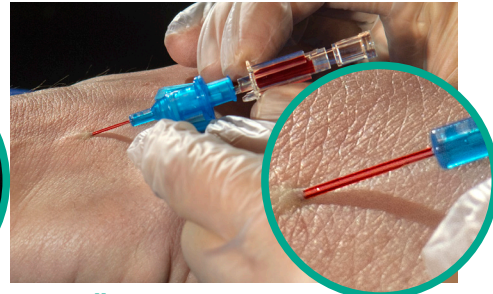


3. INFÖRANDE

- Håll stålkanylen stilla, för in katetern ytterligare cirka 3 mm med hjälp av ena vingen alternativt med grepplattan.
- Observera det andra blodsvaret mellan stålkanylen och katetern, vilket bekräftar att katetern ligger rätt i kärlet.




4. STABILISERA KATETERN

- Efter andra blodsvaret, håll stålkanylen stilla och fortsätt för in katetern i kärlet.
- Släpp stasen.

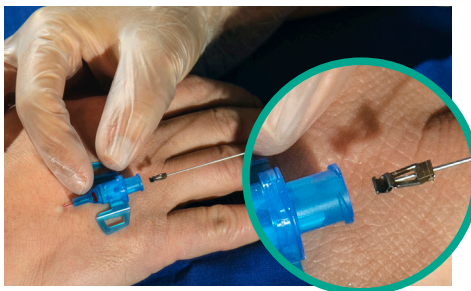

5. AVLÄGSNANDE AV STÅLKANYL

- Håll i vingen och dra tillbaka kanylen i en rak och kontrollerad rörelse tills stickskyddet aktiveras. Det är onödigt att ockludera kärlet.
- Ett septum i hubben minskar risken för blodläckage.
- Deponera kanylen i en behållare för stickande och skärande avfall.

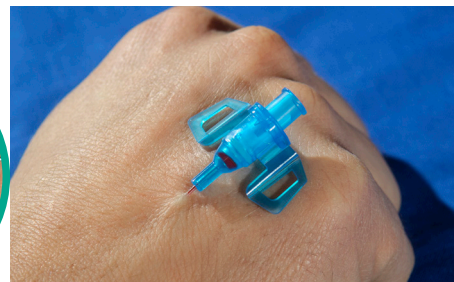


6. ANSLUTNING AV TILLBEHÖR/FIXERING

- Anslut en förslutningspropp/nålfri ventil/ infusions slang.
- Fixera med ett sterilt förband enligt lokala anvisningar.

KOMPONENTER

- A** Blodkammare
- B** Helautomatiskt stickskydd
- C** Grepplatta
- D** Fixeringsvingar
- E** Kateterhubb
- F** Septum

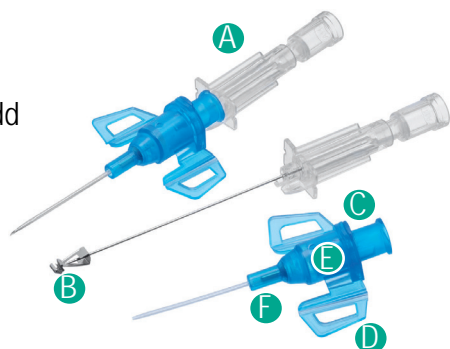

VARNING!

- Stick aldrig tillbaka nålen i katetern - katetern kan få flisor som i sin tur kan orsaka embolism.
- Om venpunktionen skulle misslyckas - ta först bort nålen för att aktivera säkerhetsmekanismen och ta sedan bort katetern från patienten.